

Clinique
vétérinaire
des Avaloirs

Véto-info



2025 n°08

Aout

Dans ce numéro :

Nettoyer un pistolet injectable

Nettoyer un pistolet injectable 1

Nettoyer un pistolet Pour-On 2



Retirer l'aiguille



Plongez l'extrémité du tube dans l'eau et pompez puis éjectez l'eau.



Pendant que l'appareil est immergé, nettoyez l'extérieur du pistolet. Faites fonctionner le pistolet à plusieurs reprises sous l'eau pour le rincer.



Puis retirez l'appareil et pompez pour éliminer l'eau se trouvant dans le cylindre




Appliquez de l'huile végétale de qualité alimentaire sur la circonférence du joint torique.

Nettoyer un pistolet Pour-On



1 Démontez le pistolet en dévissant le tuyau du bidon.

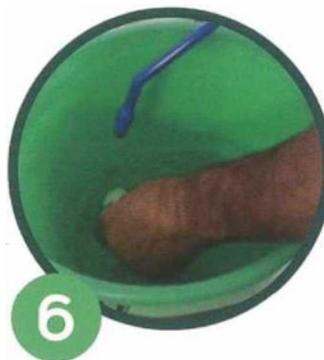

2 Renouvelez l'opération avec de l'eau claire.



3 En maintenant l'ouverture du bouchon vers le haut, versez l'excédent de produit dans le bidon en actionnant le pistolet.



4 Démontez le pistolet en dévissant la tige et le réservoir de la bague jaune.



5 Pour rincer le pistolet, munissez-vous d'un seau rempli à moitié d'eau savonneuse chaude.




6 Munissez-vous d'une feuille de papier absorbante pour nettoyer le joint.



7 Réglez le pistolet sur le plus grand volume (80 mL).



8 Puis, revissez la tige et le réservoir au reste du mécanisme.

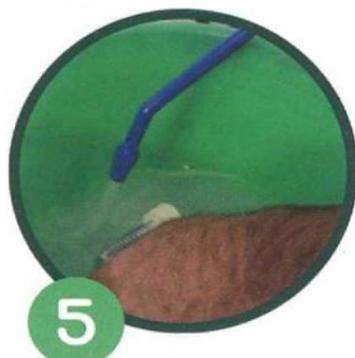

9 Plongez le bouchon du tuyau dans l'eau savonneuse puis actionnez le pistolet au-dessus du seau. Répétez l'opération 5 fois.



10 Conservez le tout dans un placard au